


水を変える 暮らしを変える

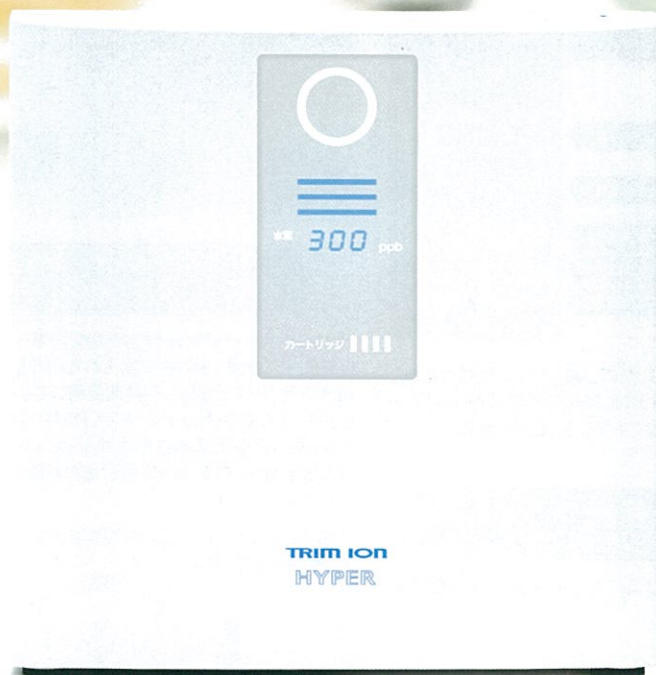

連続生成型電解水素水整水器 トリム イオン ハイパー

TRIM ION HYPER

愛され続けて30年、「ウォーターヘルスケアという、新習慣。」

私たちの身体の約60%を占める水。だから、生活のさまざまなシーンでふれあう水も、

より“いい水”をお届けしたい。日本トリムはご家族の健やかな暮らしを願い、

“おいしくて体にいい水”を日々の生活に取り入れる「ウォーターヘルスケアという、新習慣。」を提唱しています。

H₂
電解水素水で
ウォーター
ヘルスケア

効果・効能／胃腸症状の改善

- 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
- 胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

※本器は薬事法第2条第4項の政令で定める医療機器であり、第6項の厚生労働大臣が指定した管理医療機器です。管理医療機器製造販売認証番号:226AGBZX00012000

ご使用上の注意

- 飲用に適合した水(水道水など)以外には使用しないでください。
- 腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は電解水素水を飲用しないでください。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

整水器ではじめる水との新生活

整水器は、不純物を取り除いた浄水を、さらに電気分解して抗酸化性がある水素を豊富に含んだ、アルカリ性の電解水素水をつくります。

日本トリムの電解水素水整水器は、胃腸症状の改善に効果・効能があると認められた家庭用管理医療機器です。

(株)日本トリムは、1982年創業以来水の研究を続けており、当社の整水器はこれまで約85万世帯でご利用いただいております。

TRIM ION HYPERは、次世代型の高性能整水器です。

電解水素水で
ウォーターヘルスケア

コンパクト設計そして経済的


場所をとらないコンパクト設計※1なので、シンクサイドにもすっきり置いていただけます。また、1日に2リットルを5年間使用した場合、1リットルあたりのコストは約6円※2と、とても経済的です。

※1)高さ239×幅234×奥行112.5(mm)

※2) サンプル例であり、ご使用の地域やご使用方法によって金額は前後します。

シンプルでわかりやすい表示

水素水・浄水・酸性水各モードを色分けし、水素水モードでは生成水の溶存水素量(目安)をppb単位で表示します。また、カートリッジ残量は一目でわかり、交換時期もお知らせします。その他、通水量が多すぎるなどの注意・警告も表示されるので、安心してお使いいただけます。

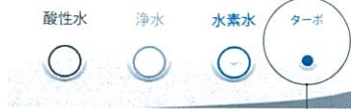

新たにターボ機能を搭載

水道水の水質は全国一律ではありません。なかには、電気分解しにくい地域もあるため、(トリムイオン HYPER)はターボ機能を搭載。1分間、通常の水素水モードよりも高い生成能力を発揮し、地域の水道水状況に合わせてお使いいただけます。

不純物16物質8トン除去

PREMIUM マイクロカーボンカートリッジ

非常に細かい活性炭(マイクロカーボン)を使用することにより、高い浄水能力を実現しました。

浄水カートリッジろ過能力

■除去可能な物質(総ろ過水量:全て8トン) ●ろ過試験流量:3.0ℓ/分

JIS規格指定13物質	5	プロモジクロロメタン	10	1,1,1-トリクロロエタン	浄水器協会自主規格3物質
1 遊離残留塩素(カルキ)	6	ジブromクロロメタン	11	CAT(農薬)	1 ジェオスミン(カビ臭)
2 濁り	7	プロモホルム	12	2-MIB(カビ臭)	2 フェノール類
3 総トリハロメタン*	8	テトラクロロエチレン	13	溶解性鉛	3 陰イオン界面活性剤
4 クロロホルム	9	トリクロロエチレン			


*総トリハロメタンとは上記4~7の4物質の総称です。




電解水素水整水器 TRIM ION HYPER 本体標準価格(税抜) ¥164,000 取付工事費別
管理医療機器製造販売元認証番号: 226AGBZX00012000

ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式で安定した電解能力を持続

〈トリムイオン HYPER〉は水を電気分解して電解水素水を生成します。そのとき、水の中に含まれているミネラル等が電極板に引き寄せられて付着し、長期間使用していると電解能力が低下します。そこで〈トリムイオン HYPER〉は定期的に電極の極性と水路を切り替える独自のダブル・オートチェンジ・クロスライン方式を採用。ミネラル等の付着を防ぎ、安定した電気分解を行います。

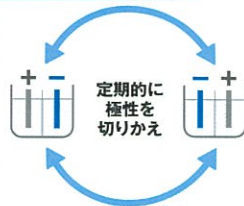

電気分解の原理

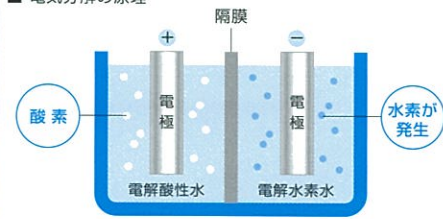

電気分解とは:

一般的には電解とも呼ばれ、水素と酸素の化合物である水に電気エネルギーを与え、水を分子状水素と分子状酸素に分解することを言います。この電気分解の原理を利用しているのが電解水素水整水器です。

電解水素水

飲用やお料理に

出汁取りや野菜のアク抜き、鍋物に使っても、素材の持ち味を引き立てます。また、ご飯の炊きあがりもふっくらし、いっそうおいしくいただけます。胃腸症状の改善にも効果・効能があると認められています。

浄水

ミルクや薬の服用に

水に含まれる不純物16物質を除去し、ワンランク上の機能を備えています。赤ちゃんのミルクや薬の服用にお使いください。

酸性水

酸性水は洗顔や洗いに肌に近い弱酸性の水、電解酸性水も生成でき、洗顔や洗い物などにお使いいただけます。

■主な仕様

●管理医療機器製造販売元認証番号: 226AGBZX00012000 ●定格電圧: AC100V ●定格周波数: 50-60Hz ●定格電流: AC5.0A ●定格電解電圧: DC55V(max.) ●消費電力: 約300W ●待機電力: 約0.6W ●電極(枚数): プラチナコーティング電極(5枚) ●生成水取水方式: 2ウェイ方式 ●電解槽: 4槽(8セル) ●電極寿命: 電解時間として1400時間(使用量・水質等の条件によって異なります。) ●定格生成量: 電解水素水 約4リットル/分(max.)、酸性水 約4リットル/分(max.)、浄水 約5リットル/分(max.) ●本体重量: 約2.8kg ●電源コード長: 約2.7m ●本体寸法: 234(W)×239(H)×112.5(D)mm ●浄水カートリッジろ過能力: JIS規格13物質8トン(除去率80%以上)、JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量3リットル/分)、浄水器協会自主規格3物質8トン(除去率80%以上)、浄水器協会規格基準の試験結果(試験ろ過流量3リットル/分)(使用量・水質等によって異なりますが、1日2リットル使用した場合で、約1年間使用できます。) ●電解槽洗浄方式: ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 ●電源回路: スイッチング・レギュレーター制御方式 ●本体保護機能: 分岐水栓定流量弁、分岐水栓警告弁(過大水压防止)、定電流制御回路(過電流防止装置)、過熱防止装置、ヒューズ(基板内蔵) 8A
※本器は改良のため予告なく仕様変更することがありますので製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。

●お求め・お問い合わせは

社団法人 日本経済団体連合会会員
社団法人 日本病院会会員
財団法人 機能水研究振興財団理事
社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



株式会社日本トリム 東証一部(証券コード:6788)

本 社/大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT オフィスタワー22F
TEL.06-6456-4600(代)
支 社/仙台・東京・名古屋・広島・福岡

その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

☎0120-328-106 <http://www.nihon-trim.co.jp/>